



## **Malaria: Colección de muestras para envío al LSPPR**

1. Tomar la muestra antes de dar tratamiento.
2. Muestra debe ser tomada en tubo de **EDTA (violeta)**. Una vez tomada la muestra se debe hacer laminilla gruesa y fina antes de una hora para evitar cambios en morfología. Estas laminillas deben estar debidamente cumplimentadas con nombre de paciente y fecha de toma de muestra.

**\*\*\*Nota:** Laminillas finas y una de las laminillas de gota gruesa deben ser enviadas teñidas con **Wright-Giemsa**

3. Adicional enviar muestra de **EDTA (tubo violeta) a 4°C**. Tubo debe estar debidamente identificado.
4. Enviar forma **CDC 50.34** debidamente cumplimentada. Importante incluir en la sección de data epidemiológica información de historial de viajes y residencia.

**\*\*\*\*Nota:** Si se ha dado tratamiento se puede tomar la muestra como está indicado pero tiene que especificar fecha de comienzo de tratamiento.

A veces es necesario tomar varias muestras en intervalos de 8-12 horas de 2 a 3 días ya que la parasitemia puede fluctuar.

### **Envío de Muestra**

1. Comunicarse a la sección de **Bacteriología Clínica** del LSPPR al **787-765-2929 x 3745**
2. Se reciben muestras en horas laborables L- V **8:00am – 3:30pm**
3. Se reciben muestras en horas no laborables con comunicación previa con epidemiología para poder contactarnos para la entrega(24/7 on call)
4. Incluir los resultados de laboratorio del CBC.
5. Entregar muestra a la siguiente dirección física:

**Laboratorio de Salud Pública de PR**  
**Departamento de Salud**  
**Calle Periferal**  
**Edificio A 2do piso**  
**Antiguo Hospital de Psiquiatría**  
**Bo. Monacillos Rio Piedras, PR 00935**